



## BEHANDELING IMMEDIAAT PROTHESE

### VAN EIGEN NATUURLIJKE TANDEN EN KIEZEN NAAR EEN KUNSTGEBIT

Om allerlei redenen kunt u uw eigen tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek zal u eventueel worden verwezen naar een kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken wordt er gestart met het aanmeten van uw eerste kunstgebit.

### HET MAKEN VAN UW IMMEDIAAT KUNSTGEBIT

Voordat de tandarts/kaakchirurg uw tanden trekt, wordt er een intra orale scan met beetbepaling gemaakt. Deze scan dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.

### HET TREKKEN VAN DE TANDEN EN KIEZEN

Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in een keer, die ingreep is nogal groot. De tandarts/kaakchirurg kan er samen met u voor kiezen om in eerste instantie uw kiezen te trekken. Uw tanden trekt hij dan pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van uw tanden en kiezen kunnen doorgaans enkele weken zitten. In deze periode krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid te genezen en te herstellen. U zult het dus enige tijd zonder kiezen moeten stellen en met eten is dat enigszins behelpen. Zolang de wonden niet zijn genezen kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzamerhand weer eten zoals u dat gewend bent.

### HET PLAATSEN VAN HET KUNSTGEBIT

Het kunstgebit wordt onmiddellijk, na het trekken van de (laatste) tanden, in de mond geplaatst. U vindt het wellicht een vreemd idee dat u een kunstgebit geplaatst krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit zich als een soort verband over de wonden plaatst. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt zal het er waarschijnlijk wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken, er is immers heel wat in u mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

### DE EERSTE DAG

De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u de immediaat prothese niet uit de mond halen. U kunt er wonden mee open trekken. En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet goed in de mond passen. De eerste uren na het trekken van uw tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer een normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden, die door het spoelen oplossen, waarna het opnieuw kan gaan bloeden. Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als de pijn aanhoudt. **Neem niet zomaar pijnstillers in, want door sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden.**





## BEHANDELING IMMEDIAAT PROTHESE

### WENNEN AAN HET EERSTE KUNSTGEBIT

Na 24 uur mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken doet de tandarts/kaakchirurg dat, of u doet het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon met een protheseborstel. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamille thee kan ook prima. Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Na verloop van tijd zal het kunstgebit niet meer lekker passen doordat uw kaak zal veranderen en de wonden verder gaan genezen. De immediaat prothese kan dan worden aangepast door middel van een rebasing. Let op: het gaat hier om een tijdelijk kunstgebit, de definitieve gebitsprothese wordt na een half jaar aangemeten.

### VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD:

#### INTAKE GESPREK

Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.

#### HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING

Eerst wordt uw gebit gescand met een intra orale scanner. Hierdoor hoeft u niet of minder te "happen". De data van deze scan kan indien gewenst worden gebruikt voor het namaken van uw tanden.

Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel tanden er zichtbaar moet zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bepaald op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Tot slot worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Met deze data en uw wensen wordt uw immediaat prothese gemaakt.

De behandeling duurt ca. 40 min.

#### EVENTUEEL WORDEN DE KIEZEN AL GETROKKEN

Indien er veel tanden getrokken dienen te worden, kan er voor gekozen worden om het trekken van de tanden in twee fases uit te voeren. Hierin worden eerst alle nog resterende kiezen eerst getrokken en zullen uw voortanden worden behouden.





## BEHANDELING IMMEDIAAT PROTHESE

### HET TREKKEN VAN DE TANDEN EN HET PLAATSEN VAN DE IMMEDIAAT PROTHESE IN DE MOND.

De immediaat prothese is klaar en de laatste tanden worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese in de mond geplaatst en gecontroleerd. U dient de immediaat prothese minimaal 24 uur in te houden.

De behandeling duurt ca. 20 min.

### NACONTROLE

In de meeste gevallen komt u na 24 uur terug bij uw tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is.

### CONTROLE 2 MAANDEN LATER

Na 2 maanden komt u terug om de prothese te laten rebasen. Er wordt dan een nieuwe "laag" in de prothese aangebracht zodat deze weer goed om de kaak aansluit. Ook deze behandeling wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat dit meerdere malen moet gebeuren, afhankelijk van hoeveel uw kaak gaat veranderen.

### CONTROLE / VERVOLG NA 6 MAANDEN

Na 6 maanden mag u naar een definitieve prothese. Het voordeel dat u heeft met een AvaDent immediaat prothese is dat al uw gegevens digitaal zijn opgeslagen. Hierdoor kunt u de definitieve prothese af laten stemmen op de immediaat prothese als u bijvoorbeeld tevreden was over de opstelling van de tanden. Hierdoor hoeft uw uiterlijk en gebit indien gewenst, nauwelijks te veranderen.

