



## BEHANDELING VOLLEDIGE PROTHESE

### EEN KUNSTGEBIT

Bent u uw kunstgebit kwijt, bent u toe aan een nieuwe of functioneert de oude prothese niet meer? Er zijn verschillende redenen om een nieuw kunstgebit te laten aanmeten. Met de nieuwste innovaties heeft u vele en nieuwe voordelen, waarbij veelal betere resultaten worden behaald.

### HET MAKEN VAN UW KUNSTGEBIT

Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.

## VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD:

### INTAKE GESPREK

Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.

### HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING

Afhankelijk van uw huidige situatie wordt het juiste behandelplan voor een scan bepaald. Er zijn hierbij twee situaties mogelijk:

#### U heeft al een prothese

Uw huidige prothese zal worden gebruikt om opnieuw uw beet vast te leggen. Eerst wordt er een nieuwe afdruk met uw huidige prothese gemaakt en worden uw wensen besproken door te kijken naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Daarnaast wordt er vastgelegd op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Indien u tevreden was met de opstelling en het uiterlijk van uw "oude" prothese dan kan deze worden overgenomen in de nieuwe AvaDent prothese. Tot slot worden al deze gegevens ingescand en krijgt u na afloop van uw behandeling de "oude" prothese weer mee naar huis. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent prothese gemaakt.

De behandeling duurt ca. 45 min.



Zeker. Geen gewoon gebit.



## BEHANDELING VOLLEDIGE PROTHESE

### Geen prothese

Er wordt een intra orale scan gemaakt van uw huidige kaak. Daarnaast zullen er een aantal gegevens worden opgemeten en worden uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent pasprothese gemaakt.

De behandeling duurt ca. 45 min.

### EVENTUELE PASFASE

Met behulp van de pasprothese worden uw wensen nogmaals besproken. Er wordt o.a. gekeken naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bekeken op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden bekeken en uw wensen van de opstelling besproken.

De behandeling duurt ca. 45 min.

### PASSEN PROTHESE

De AvaDent prothese wordt gepast. Het kan in het begin even wennen zijn. Indien nodig kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. U ontvangt dan bij de vervolg afspraak de prothese om weer te passen. Als u tevreden bent kunt u ermee naar huis.

De behandeling duurt ca. 15 min.

### NACONTROLE

In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe prothese en kunt u zonder problemen de prothese blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om de problemen te laten verhelpen.

### JAARLIJKSE CONTROLE

Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u in de toekomst de prothese moeten laten vervangen, dan heeft u met de AvaDent prothese een digitale back-up. Hierdoor hoeft uw uiterlijk en de opstelling van het kunstgebit niet te veranderen wanneer er een nieuw kunstgebit gemaakt dient te worden.

